



株式会社アイルデンタル

小児睡眠時**育脳**サポート装置

Vシリーズ

(Vキッズ・Vジュニア・Vベース)

手引き



小児睡眠時育脳サポート装置Vシリーズ（Vキッズ・Vジュニア・Vベース）

ご発注の流れ

ご発注には、Vキッズ会のご入会をお願いしております
【年会費13000円（税込み）】※ご入会より1年間有効

※Vキッズ会のメリット

- ・技工料の会員割引【通常15000円→**会員価格14000円（税別）**】
- ・三つ折りチラシ・漫画チラシ 無料配布
- ・株式会社アイルデンタルホームページ内会員サイト閲覧（パスワードが必要です）
- ・各種セミナーの会員割引
- ・会報の定期配布
- ・メールマガジン配信

■Vキッズ会入会手続き方法

アイルデンタルホームページよりご入会いただけます

株式会社アイルデンタルHP (<https://iwilldental.com>)



『医療関係者の方はこちら』



医療関係者の方



セミナー資料・Vキッズ会（パスワード vkids0917）
(全て小文字)



『Vキッズ会に入会する』から、お手続きください

■技工料は、口座引き落としとなります

シャープファイナンス株式会社集金代行システムを使用いたしております
預金口座振替確認書にてお手続きをお願い致します
お手続き完了まで（約2カ月程度）は、お振込みにてご対応下さい

■技工物発送とアポイント日

発注書と模型（硬石こう）を割れないように梱包していただき、株式会社アイルデンタル（〒663-8006 兵庫県西宮市段上町4丁目1-34）まで元払いで送ってください

発注書には、年齢・症状をチェックしていただく部分がございます

カラーの記載もお願いします。

※記載がない場合は、透明で製作させていただきます

※セットのアポイント日は、12日～14日後でお取りください

アポイント日の2日前には歯科医院様に到着する様に発送させていただきます

ご確認頂き、到着していない場合は、お手数ですがアイルデンタルまでご連絡いただけると幸いです（TEL：0798-61-5771）

※印象からアポイント日まで日数があくと、歯列の変化により初回セット時に内面の調整が必要となる場合があります

※次回アポイント日の記載が無い場合は、最短の期日でお作り致します

■送付物、技工料とご請求書のご案内

- 【送付物】
- ・装置
 - ・送付して頂いた模型（副模型）
 - ・ケース
 - ・経過観察記録Book（VキッズBook・VジュニアBook）
 - ・かばん
 - ・タッチブラシ
 - ・取り扱い説明書（患者様用・歯科医院様用）
 - ・納品書

【技工料】 15000円（税別）
※Vキッズ会員様は14000円（税別）

【請求書】 発送日ベースで月末締めにてご請求書を送付させていただきます
翌月26日に登録して頂いた口座よりお引き落としさせていただきます
（土、日祝日の場合は翌営業日となります）
※口座引き落としのお手続きが完了するまで（約2カ月）は（株）アイルデンタルへお振込みでお支払いをお願い致します

株式会社アイルデンタルでは、売り上げの一部を、兵庫県神戸市の小児がん施設チャイルドケモハウスに毎月寄付させて頂いております
皆様のご協力に感謝申し上げます



■初回セットから終了までの流れ

【初回セット時】

※子供達の成長には個人差があります。それぞれの子供達に合わせて調整をお願いします

- ・本人に触ってもらい、下の歯につけてもらう（3歳児でも自分で着脱可能です）
- ・がたつきが無いか確認します
- ・咬合紙で噛み合わせをチェックします（Eが強く当たり過ぎないようにしましょう）
- ・リップシールの確認
- ・必ず子供本人に不快な部分が無いか確認して下さい

※経過観察記録Book（VキッズBook・VジュニアBook）の説明

※装置の使い方の説明

【2週間後チェック】

- ・朝まで装着できているか？
- ・嫌がっていないか？
- ・装着を嫌がる時は、調整のサインです
- ・内面で強く当たっている部分は無いか？
- ・左右対称に当たっているか？

※短期間で変化の見られるお子様も多いので、保護者の方は気が付いていらっしゃる変化を術者が見つけたらお伝えしましょう（顔貌の変化・睡眠の変化・生活習慣の変化等…）

【検診について】

※6歳臼歯が萌出している場合は、萌出確保の為2週間後チェックの際にカットしてください

◎乳歯列期（3～6歳 個人差あり）【Vキッズ】

主たる目的は、睡眠時の酸素供給による睡眠の質の改善と上顎骨へ負荷をかけることによる成長発育

※睡眠の質が良くなったことで見られる生活の変化

- ・朝の寝起きが良くなった
- ・寝相が良くなった
- ・いびきをかかなくなった
- ・夜に起きなくなった
- ・朝ごはんをしっかり食べるようになった
- ・活動的になった

- ・ゴロゴロしなくなった
- ・ほおずえをつかなくなった
など

※顔貌の変化

- ・目の下のクマの改善 ※Vキッズ患者様説明紙芝居 P. 6 参照
- ・顔つきの変化（顎のライン、頬骨の変化） ※Vキッズ患者様説明紙芝居 P. 8 参照

低年齢児（乳歯列期）は歯列の変化も少ないので一定の期間は、調整をせずに装着しても大丈夫です（3カ月に1度くらいの頻度で検診）

4～5歳が初診、もしくは3歳から使用している子供が4～5歳になる

※前合わせに自分でもって来ることが出来るか？（切端咬合に近い位置）

前合わせで前歯部に圧痕を付ける（3カ月間くらい）

※上顎骨、鼻腔、前頭葉に負荷をかけて成長させたい

※しっかり負荷がかかった際に見られる変化

- ・顔貌の変化
- ・頸椎の変化
- ・姿勢の変化
- ・咬合の変化
- ・運動量の変化
など

※5歳以降は、 2×2 の萌出が始まりきつくなったり、装置ががたついたりするお子様もいらっしゃるので、1カ月に一度は来院して頂きましょう。

◎混合歯列期（7～12歳）【Vジュニア】

主たる目的は、睡眠時の酸素供給による睡眠の質の改善
日中の活動量増加と全身への成長発育

下顎2～2の萌出が歯冠1/2以下の場合

内面調整をしながら6カ月使用

※萌出確保の為、1カ月に1度は検診

(注) 内面をくり抜く際に装置が薄くなると破折の原因となるので気を付ける
左右のがたつきや たわみがあると破折の原因となるので気を付ける

下顎2～2の萌出が歯冠2/3ほどある場合

内面調整しながら3カ月使用可能

※年齢が高くても矯正前にVジュニアを一定期間装着することで、後の矯正治療を行う場合
もスムーズに移行できます。矯正前にVジュニアの使用を推奨しています

◎永久歯列期 完全萌出（13歳～）【Vベース】

主たる目的は、下顎を前方に出しやすくする事 咬合高径を上げることにより
睡眠時の酸素供給による睡眠の質の改善

継続的に使用可能（変化がみられる場合もあるので、定期的にチェックは必要です）



株式会社アイルデンタル

〒663-8006 兵庫県西宮市段上町4丁目 1-34

TEL : 0798-61-5771 FAX : 0798-61-5772

<https://iwilldental.co>